



# IKAZIA 5921



Abgebildet: mit Wandhalterung  
Art.-Nr. 7.25.926.00)

## EIGENSCHAFTEN

- Augenspülflasche mit Augenbad
- Die Spüllösung besteht aus einer sterilen Kochsalzlösung: 0,9% Natriumchlorid (NaCl)
- Unverzichtbarer Erste-Hilfe-Artikel
- Wird verwendet, wenn Chemikalien, Schmutz oder Splitter in das Auge gelangen
- Die Augenspülung verhindert oder vermindert Schäden am Auge
- Ausgestattet mit einer integrierten und ergonomisch geformten Augenwanne, so dass die Flasche richtig auf das Auge gerichtet werden kann und die Augen beim Spülen offen bleiben
- Einfach mit einer Hand zu bedienen
- Kompakt und hygienisch
- Das Fläschchen ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sein Inhalt kann für eine intensive Spülung von etwa fünf Minuten verwendet werden.
- Die Lager- und Gebrauchstemperatur dieser Augenspülung liegt zwischen 5°C und +35°C
- Inhalt: 500 ml

Artikelnummer: 7.25.921.00

## U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Petrochemie
- Laboratorien
- Metallbranche
- Transport & Logistik
- Automobilindustrie

## VERPACKUNG

- 1 Stück
- 10 Stück im Karton

CE 0123

### ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK	EAN-CODE 10 STÜCK (KARTON)
Einheitsgröße	7.25.921.00	8718249079924	8718249079931

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Verwenden Sie das Produkt, um Schmutz gründlich aus dem Auge zu spülen oder kleine Wunden auf der Haut zu reinigen.

1. Drehen Sie den Verschluss vorsichtig in beide Richtungen, um die Versiegelung zu lösen, und entfernen Sie den Verschluss. Halten Sie die Flasche über das Auge und drücken Sie sie leicht zusammen, damit die Flüssigkeit ungehindert über den Augapfel zum äußeren Augenwinkel fließen kann. Reinigen Sie das Auge oder die Augen mit so viel Lösung wie nötig.

### GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE AUGENBAD

1. Öffnen Sie die Flasche wie oben beschrieben. Setzen Sie die Augenbadewanne direkt auf das Auge und drücken Sie sie leicht zusammen, damit die Flüssigkeit ungehindert über das Auge fließen kann. Reinigen Sie das Auge mit so viel Lösung wie nötig.

### BITTE BEACHTEN SIE!

Es sind keine Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von steriler Natriumchloridlösung 0,9 % w/v bekannt. Unangenehme Nebenwirkungen sollten einem Arzt, Apotheker oder einer Krankenschwester gemeldet werden.

**Jeder Vorfall, der die Augen betrifft, muss ernst genommen werden. Suchen Sie nach der Verwendung sofort einen Arzt auf.**



- Nur zur äußerlichen Anwendung
- Nicht zur Injektion geeignet
- Nicht bei intraokularen Operationen verwenden
- Nicht verwenden, wenn sich die Lösung verfärbt oder trüb wird
- Nicht wiederverwenden; nicht verwendeten Inhalt nach dem Öffnen entsorgen



- Kontamination vermeiden
- Nicht als Kontaktlinsenlösung verwenden
- Vor Ablauf des Verfallsdatums verwenden



### VERWANDTE ARTIKEL



#### OXXA LAURENTIUS 5926 AUGENSPÜLFLASCHE WANDHALTERUNG

Art.-Nr. 7.25.926.00

### IHR LIEFERANT: