



Incidin® Plus

REINIGENDE DESINFECTANS VOOR
MEDISCHE HULPMIDDELEN
(MEDICAL DEVICES)

- ▲ Op basis van de gepatenteerde werkstof Glucoprotamine
- ▲ Breed werkingsspectrum en uitstekende reinigende werking
- ▲ Oppervlakkendesinfectie volgens VAH / RKI



Incidin® Plus

REINIGENDE DESINFECTANS VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN (MEDICAL DEVICES)



Onze prestatie	Uw nut
Breed werkingsspectrum tegen bacteriën (incl. MRSA en TBC), gistendodend	Grote zekerheid van desinfectie van alle afwasbare oppervlakken zelfs in risicozones
Op basis van de gepatenteerde werkstof Glucoprotamine, zonder quaternaire ammonia	Goede biologische afbreekbaarheid
Compatibiliteit met verschillende materiaalsoorten	Kan gebruikt worden op : • metaal, bv. : messing • synthetische materialen • elastomeren, bv. : EPDM • vloerbekledingen, bv. linoleum,

TOEPASSINGSGBIED

Voor gebruik in ziekenhuizen, medische praktijken en rust- en verzorgingstehuizen.

TOEPASSING / GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlakkendesinfectans bestemd voor medische hulpmiddelen, geschikt voor alle afwasbare oppervlakken (Medical Devices)

Het product verdunnen in water van max. 30°C. Gebruik van hulpmiddelen voor een correcte dosering wordt aanbevolen. Niet naspoelen of nadrogen. Voor manueel gebruik.

Werkingspectrum	Conc %	Inwerktijd
Oppervlakkendesinfectie in ziekenhuizen en in medische praktijken (DGHM) Medical Devices	0,25 0,5 1,0 2,0	4 uur 1 uur 30 min 15 min
Werking tegen : Vaccinavirus (Elstree) Adenovirus (Adenoide 6) Papovavirus SV 40 (777)	0,5 1,0 0,5	15 min 1 uur 1 uur
Werking tegen HIV	0,25	5 min
Werking tegen het herpesvirus	0,1	5 min
Werking tegen het HBV in de MADT : risicozone profylaxe	0,5 1,0	2 uur 90 min
Werking tegen het HBV in de antigenetest	0,5 1	1 uur 30 min
Werking tegen het rotavirus	0,5	15 min
Doeltreffendheid tegen tuberculose (Medical Devices)	0,5 1,0 2,0	4 uur 1 uur 30 min
Fungicide volgens EN 1275	2,0	5 min.

SAMENSTELLING

100 g bevat : 26 g glucoprotamine

INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier en veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag.

VERPAKKINGEN / REFERENTIES

Doseerflacon 2 L – verp. : 3 x 2 L –
ref. : 3054870

6 L bidon – verp. : 1x 6 L – ref. 3054920

Zakje 20 ml – verp. : 250 x 20 ml –
ref. : 3022880



Ecolab BVBA/SPRL
Noordkustlaan 16C – 1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com

Microtek Medical BV, A Division of Ecolab
Hekkehorst 24, 7207 BN ZUTPHEN (NL)
Tel : 31 575.599.200