



## Brugsanvisning for filtrerende halvmaske til beskyttelse mod Partikler.

Støvmaske FFP2 NR D med udåndingsventil

### Standard

Kategori III i henhold til EU Regulativ 2016/425. Produktionskontrol iht. PPE regulativ EU 2016/425 modul C2. Kontrolleret af bemyndiget organ Dekra CE 0158 (Dinnendahlstrasse 9, D-44809 Bochum). Disse støvmasker opfylder kravene i henhold til den europæiske standard EN149:2001+A1:2009, til filtrerende ansigtsmasker til brug til beskyttelse mod partikler som er faste eller ikke-flygtige væskeformige.

### Formål

Støvmasken er et åndedrætsværn som består helt eller hovedsageligt af filtermateriale. Støvmaskerne beskytter kun mod ikke-flygtige, faste og væskeformige partikler (støv, røg, aerosoler og aerosoldampe).

### Forudsætninger for brug af støvmasker

- Instruksen bør læses og følges. Hvis brugsanvisningen og informationen ikke overholdes, kan det skade brugeren og give varig invaliditet.
- Brugeren bør være fortrolig med hvordan masken skal anvendes.
- Luftens ilt indhold må ikke være under 17 %.
- Det er ikke tilladt at gå ind i ikke-ventilerede containere, udgravninger, rørledninger og aflåste områder med filtrerende halvmaske til beskyttelse mod partikler.
- Sammensætningen og koncentration af skadelige stoffer skal være kendt.
- Filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler beskytter ikke mod gasser og dampe.
- Hvis det bliver svært at udånde, bør masken skiftes.
- Denne type støvmaske må ikke anvendes i mere end 3 timer pr. døgn.
- Denne type støvmaske er uegnet for personer med skæg, eller skægstubbe eller hvis personen har dybe ar i området omkring kanten af åndedrætsværnet.
- Hvis det er fare for iltmangel eller forholdene er ukendte, skal der anvendes friskluft forsynet åndedrætsværn, der er uafhængig af omgivelserne.

### Kontrol før brug

For at beskytte helbredet er det afgørende, at der vælges beskyttelse efter arbejdsforholdene. Man bør sikre sig at åndedrætsværnet beskytter mod de partikler, der findes i omgivelserne. Ved tvivl om valg af beskyttelse, kontakt da Bunzl eller anden faglig specialist.

Følg producentens anvisninger om påtagning af masken og efterfølgende tjek. Før masken tages i brug, bør man kontrollere om den har synlige skader.